

## Каждый день ...

- > Вы работаете без усилий, с инъекциями оптимальными по продолжительности действия и эффективности.
- > Вы избавляете детей от слез, делая укол "электронной ручкой".
- > Вы выполняете интратригемтарную и интрасептальную анестезию без сгибов иглы, утечки анестетика, без неудач, одной инъекцией и без усилий. Благодаря захвату "по типу ручки" и иглам DHT со специальной формой режущего края, как у скальпеля, вы вводите иглу в любой тип ткани без боли. Анестезия становится проще и эффективнее.
- > Вы выполняете все методики анестезии (включая небную) абсолютно безболезненно.
- > Вы выполняете проводниковую анестезию с большей точностью, а следовательно с меньшим числом неудач.




## Технические характеристики: SleeperOne®

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>				
Типы анестезии	интратригемтарная, интрасептальная, инфльтрационная, проводниковая, небная			
<b>НАКОНЕЧНИК</b>				
Скорости введения	4 (2 низкие/2 высокие)			
Шнур	2,5м			
Длина х диаметр макс (мм)	228 х 26			
Вес (гр)	241			
<b>ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА</b>				
Тип фиксации	Клеящая основа (в комплекте)			
Встроенная система безопасного возвращения иглы в колпачок	Да			
Длина х ширина х высота (мм)	75 х 44 х 44			
<b>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ</b>				
Функции	-			
Фиксация	Горизонтальная и вертикальная (фиксаторы в комплекте)			
Длина х ширина х высота (мм)	109 х 78 х 24			
Вес (гр)	106			
Мощность	18V			
<b>БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ</b>				
Связь	Беспроводная, безжуклаторная педаль, зона действия - 5м (при отсутствии материальных препятствий между педалью и блоком управления)			
Функции	Очень медленное капельное введение на низкой прогрессирующей скорости, медленное струйное введение на низкой постоянной скорости, высокая прогрессирующая скорость введения, высокая постоянная скорость введения, возврат поршня, аспирация.			
Дуговой держатель	да			
Длина х ширина х высота (мм)	250 х 180 х 63			
Вес (гр)	603			
<b>ПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ (ОПЦИЯ)</b>				
Связь	шнур 2000мм			
Функции	Очень медленное капельное введение на низкой прогрессирующей скорости, медленное струйное введение на низкой постоянной скорости, высокая прогрессирующая скорость введения, высокая постоянная скорость введения, возврат поршня, аспирация.			
Длина х ширина х высота (мм)	185 х 145 х 33			
Вес (гр)	320			
<b>СКОРОСТИ ВВЕДЕНИЯ</b>				
	Низкая прогрессирующая скорость введения	Низкая постоянная скорость введения	Высокая постоянная скорость введения	Высокая прогрессирующая скорость введения
1/4 карпулы	140 сек.	50 сек.	17 сек.	30 сек.
1/2 карпулы	275 сек.	90 сек.	35 сек.	45 сек.
3/4 карпулы	410 сек.	135 сек.	50 сек.	60 сек.
1 карпула	550 сек.	180 сек.	70 сек.	80 сек.
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
Иглы	Иглы DHT или стандартные			
Карпула	Стандартная стеклянная карпула 1,8мл			
<b>ПРОЧЕЕ</b>				
Гарантия	2 года на аппарат (на определенных условиях и исключая аксессуары)			



ПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ (опция)

# SleeperOne®

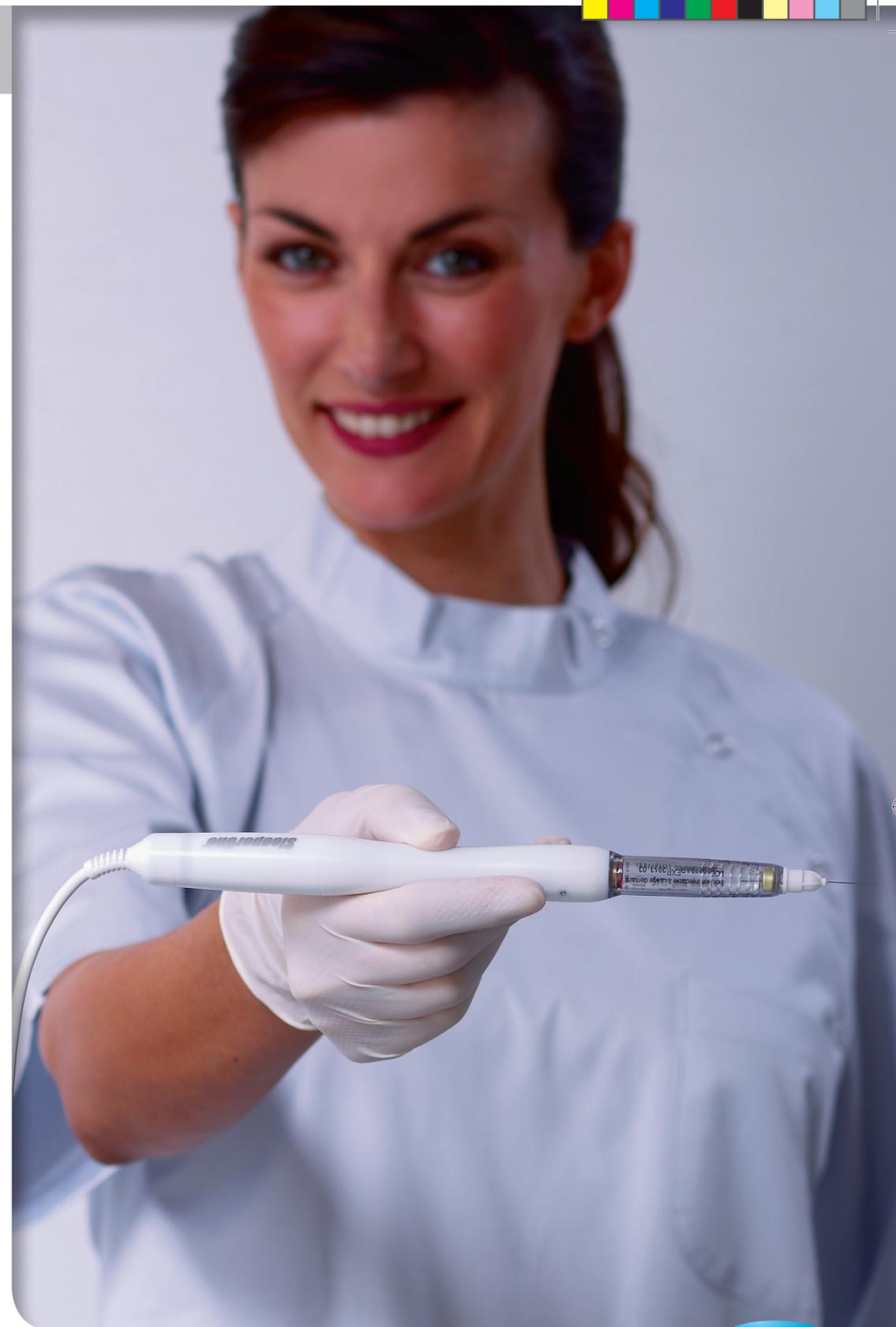

DHT

**DENTAL HI TEC**

Анестезия - наша специальность

BP 30051 · 49308 CHOLET cedex · FRANCE  
Tel : +33 (0)2 41 56 41 91 · Fax : +33 (0)2 41 56 16 15  
mail@dentalhitec.com

123424, Россия, Москва, Столярный пер, д.2  
+7 (495) 781-76-64, 921-35-06  
www.ts dental.ru, info@ts dental.ru

**DENTAL HI TEC**

Анестезия - наша специальность

www.dentalhitec.com

www.dentalhitec.com

SleeperOne®

# SleeperOne - мы предлагаем Вам лучшую технологию

В сочетании с иглами DHT, SleeperOne является самой эффективной системой для выполнения интралигаментарной, интрасептальной, инфильтрационной, небной и проводниковой анестезии.

Безболезненная анестезия неба и прикрепленной слизистой. При капальном введении (очень медленно, на низкой прогрессирующей скорости) анестетик распространяется постепенно.



Интралигаментарные и интрасептальные инъекции выполняются легко и без послеоперативных осложнений, благодаря постоянному контролю скорости и давления при введении. Анестетик медленно и естественно распространяется в тканях.

Для комфортного выполнения проводниковой и инфильтрационной анестезии вы можете



выбрать постоянную или прогрессирующую скорость введения анестетика.



**Педаль без проводов и батареек!**

Необходимая энергия вырабатывается при нажатии на педаль. Не нужно менять батарейки или ставить на подзарядку.




**Световой индикатор введения.**

Световой индикатор на наконечнике показывает степень сопротивления при введении для точного контроля над инъекцией.



**Скрытый блок управления.**

Блок управления очень легкий (110гр) и без кнопок. Его легко зафиксировать на блоке врача стоматологической установки. Простая и органичная интеграция.

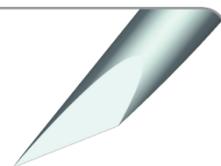

**Эффективные иглы.**

Иглы DHT с режущим краем как у скальпеля легко проникают в любые ткани, без усилий, скручиваний и без болевых ощущений у пациента.



**Экономически эффективный.**

Все аксессуары стерилизуются в автоклаве (134°C/ 275°F), карпулы и иглы - стандартные, что минимизирует эксплуатационные расходы.



**Непревзойденная точность.**

Благодаря захвату по принципу ручки, который позволяет держать наконечник близко к игле и исключает дрожь пальцев, а также легкости наконечника, SleeperOne позволяет выбрать наиболее эффективные точки опоры при работе. Это гарантирует высокую точность движений.

Комфорт

**2 года гарантии.**

В процессе производства, наши аппараты проходят тщательное тестирование более, чем на 200 контрольных точках. Это позволяет нам давать гарантию 2 года\* на аппарат SleeperOne.



**Безопасность.**

Компактный держатель наконечника легко интегрируется в стоматологическую установку. Система безопасности позволяет возвращать иглу в колпачок без риска загрязнения.